

## Инструкция по эксплуатации автоклава 2540МКА

1. Убедитесь, что прибор подключён к электросети.
2. Убедитесь в наличии деминерализованной воды в баке. В случае отсутствия воды, налейте её до уровня опоры предохранительного клапана. Запрещено наливать воду до уровня, при котором предохранительный клапан будет погружён в неё.
3. Включите прибор нажатием на кнопку POWER ①. Убедитесь, что лампочка END CYCLE загорелась. Убедитесь, что переключатель NIGHT находится в положении ON. Выждите 10 минут – это необходимо для прогрева прибора.
4. Доведите красную стрелку манометра ⑤ до положения «0» в начале любого цикла.
5. Откройте дверь, нажмите выключатель WATER ② и держите в нажатом положении до тех пор, пока вода не дойдёт до линии рядом с отверстием стерилизационной камеры.
6. Поставьте стерилизуемые инструменты в камеру автоклава. **Внимание!**  
 Необёрнутые металлические предметы: - не более 6 кг  
 Обёрнутые (в мешках) мет. предметы: - не более 2 кг  
 Не кладите чрезмерное количество инструментов на верхний поддон! Оставьте пространство между инструментами и стенкой бака во избежание соприкосновения инструментов со стенкой!
7. Выберите температуру стерилизации с помощью переключателя ④.
8. Надёжно закройте дверь.
9. Установите таймеры ⑥ и ⑦ на необходимое время цикла.
  - Для стерилизации при температуре 134°C (2.1 Бар) установить
    - таймер TIMER STER ⑥ на 20 мин. (прогрев + стерилизация)
    - таймер TIMER STE. + DRY ⑦ на 60 мин.
  - Для стерилизации при температуре 121°C (1.1 Бар) установить
    - таймер TIMER STER ⑥ на 30 мин. (прогрев + стерилизация),
    - таймер TIMER STE. + DRY ⑦ на 60 мин..
10. При завершении любого цикла перед извлечением стерилизуемых предметов убедитесь, что красная стрелка манометра ⑤ доведена до выбранного давления стерилизации:
  - Для цикла при температуре 134°C: давление 2.1-2.2 Бар;
  - Для цикла при температуре 121°C: давление 1.1 Бар.
11. **Внимание** – перед открытием двери убедитесь, что давление на манометре ⑤ равно 0 (белая стрелка).
  - Если вы хотите выполнить обычный цикл без сушки, установите таймер TIMER STE. + DRY ⑦ на время, на 5 минут большее, чем на таймере TIMER STER. ⑥.
  - Если вы хотите установить выполнение цикла с сушкой и оставить автоклав работать без присмотра, следует установить переключатель NIGHT ③ на 0 (по возвращении не забудьте вернуть его в положение 1).
12. Стерилизация жидкостей.  
**Внимание!** Если вы хотите стерилизовать жидкости при температуре 121°C, установите переключатель NIGHT ③ в положение 0 и установите таймер TIMER STER. ⑥ на 30 мин.. Таймер TIMER STE. + DRY ⑦ остаётся в положении 0 (медленный сброс конденсата осуществляется через устройство для выпуска воздуха). В случае, если вы возвращаетесь к циклу с сушкой, верните переключатель NIGHT в положение 1.  
**Внимание!** Перед открытием двери убедитесь, что манометр показывает нулевое давление!

- ① Питание
- ② Вода
- ③ Ночной режим
- ④ Температура
- ⑤ Манометр
- ⑥ Таймер стерилизации
- ⑦ Таймер стерилизации и сушки

