



"Endo Куб"

- Серый лоток безопасен для автоклава
- 2 линейки измерения длины файла (A + B).
- Резервуар для смазочных материалов
- Разборный

Инструкция по стерилизации

1. Извлеките лоток из органайзера, осторожно нажав на язычок в верхней части лотка. (за дезинфицирующими резервуарами).
2. Поместите серый лоток с инструментами в автоклав.
3. Запустите автоклав в заданные циклы (134°C в течение 5 минут или 121°C в течение 20 минут).
4. Обязательно закрепите лоток под язычком на верхней части органайзера.
5. Закройте защитную крышку для предотвращения перекрестного загрязнения.

MEDICNRG™
Precise Endo Technology

Panoramic Endodontic Organizer



**Панорамный стенд
для боров и файлов**

- Четкий обзор каждого инструмента
- Легкий доступ к каждому инструменту
- Маркированные отделы для инструментов
- Съёмный лоток пригодный для стерилизации в автоклаве
- Съёмный "Endo Куб" для измерения и дезинфекции файлов
- Регулируемый выдвижной ящик
- Вентилируемые гнезда для боров
- Съёмная защитная крышка
- Не скользящие резиновые ножки



Удобный доступ

Панорамная форма предоставляет четкий обзор и легкий доступ к каждому инструменту.



Устранение перекрестного загрязнения

Съёмный лоток для инструментов и «Endo Куб» подходят для стерилизации в автоклаве. Кроме того, имеются резервуары для дезинфицирующих жидкостей и хлопковых гранул. Это, в сочетании с прозрачной съёмной крышкой, помогает предотвратить перекрестное загрязнение и защищает инструменты.

Маркированная рабочая станция

Лоток четко разделен на области, предназначенные для различных инструментов Эндодонтики, необходимых для выполнения процедур. Кроме того, органайзер включает в себя удобный выдвижной ящик с отсеками.

Вентилируемые валы

Запатентованная подставка с открытой конструкцией позволяет ускорить время высыхания и предотвращает коррозию благодаря системе вентиляции и дренажа.

Простота обслуживания

Организатор легко разбирается. Части можно очищать отдельно.