

Chamber Brite™ - Powdered Autoclave Cleaner



Tuttnauer™
Your Sterilization & Infection Control Partners

CHAMBER BRITE - специально разработанное средство для расщепления белка, очистки, удаления накипи, оксидов и других отложений, которые образуются в процессе работы автоклавов. Представляет собой комбинацию из кислых солей и дополнительных чистящих материалов.

ИНСТРУКЦИЯ.

Очистка автоклавов с помощью средства Chamber Brite.

Проводить очистку **ОДИН** раз в месяц или по мере необходимости.

Для автоклавов с объемом камеры до 30 литров – использовать **ОДИН** пакет средства Chamber Brite.

Для автоклавов с объемом камеры больше 30 литров – использовать **ДВА** пакета средства Chamber Brite.

ВНИМАНИЕ:

- запрещено использовать в вакуумных автоклавах класса «S» и «B»

- запрещено стерилизовать инструменты в процессе очистки

Процедура очистки

ВНИМАНИЕ: для процедуры очистки использовать режимы **БЕЗ СУШКИ !!!**

1. Важно - все шаги этой процедуры должны быть проведены без перерыва.
2. Из охлажденной камеры удалить все инструменты и лотки.
3. Откройте дверь и нанесите содержимое пакета по прямой линии, от задней стенки к дверце.
4. Проверьте наличие воды в резервуаре !!!
Выберите и запустите программу № 1 (БЕЗ СУШКИ)
После завершения цикла – выключить устройство.
5. Слейте отработанную воду из резервуара.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКРЫТЬ КЛАПАН СЛИВА ВОДЫ !!!
6. Протрите влажной тканью или салфеткой внутреннюю часть камеры автоклава.
7. Наполните резервуар чистой водой (объем 1,5 – 2 л)
8. Повторите цикл стерилизации без средства Chamber Brite, чтобы удалить чрезмерную грязь в трубах.
Выберите и запустите программу № 1 (БЕЗ СУШКИ)
После завершения цикла – выключить устройство.



9. Слейте отработанную воду из резервуара.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКРЫТЬ КЛАПАН СЛИВА ВОДЫ !!!

10. Выключите автоклав и дождитесь охлаждения камеры.

11. Протрите влажной тканью или салфеткой внутреннюю часть камеры автоклава.

12. Наполните резервуар для дистиллированной воды.

13. Прибор готов к использованию.

ВНИМАНИЕ:

ЕСЛИ АВТОКЛАВ НЕ ОБСЛУЖИВАЛСЯ БОЛЕЕ 2-3 МЕСЯЦЕВ

– **ПОВТОРИТЬ ПРОЦЕДУРУ ОЧИСТКИ (ВСЕ 14 ПУНКТОВ)**

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОГО ПАКЕТА СРЕДСТВА «CHAMBER BRITE»



Меры безопасности: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с кожей, глазами или одеждой. Мойте руки после прикосновения к порошку, в случае попадания в глаза промойте большим количеством проточной водой в течение не менее 15 минут. Если раздражение не проходит обратиться к врачу. При случайном проглатывании не вызывать рвоту, выпейте большое количество воды и обратиться к врачу.