

Noritake

ДЕСНЕВОЙ ФАРФОР TISSUE

Tissue Porcelain

Super Porcelain EX-3 Super Porcelain EX-3 PRESS CZR CZR PRESS



Noritake обновили линейку десневых фарфоров в каждой категории:
EX-3 и EX-3 PRESS - керамика для нанесения на металл
CZR и CZR PRESS - керамика для нанесения на оксид циркония

Hiro Tokutomi
Hiro Tokutomi

ЛИНЕЙКА ДЕСНЕВЫХ ФАРФОРОВ

Эта линейка десневых фарфоров позволяет воспроизвести натуральный цвет десны на коронках, мостах и имплантах.




Tissue 1
Средний цвет десны



Tissue 2
Светлый оттенок десны



Tissue 3
Темный оттенок десны

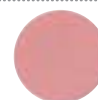

Tissue 4
Смешивайте с 1, 2 и 3 для усиления оттенка



Tissue 5
Красный опаковый цвет для внутренней десны



Tissue 6
Ярко-розовый цвет десны



Tissue 7
Насыщенный красный цвет для поверхности десны

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ДЕСНЕВОГО ФАРФОРА



1 Чтобы усилить бондинг между цирконием и керамикой, нанесите очень тонкий слой Tissue 4 в качестве wash-bake.



4 После спекания



2 Нанесите Tissue 4 (малая прозрачность и сильный оттенок) для придания прозрачности в базальной части коронки



5 Нанесите Tissue 6, чтобы создать яркий цвет десны в пришеечной области



3 Нанесите Tissue 7 в плечевую область, чтобы создать насыщенный красный цвет десны



6 Сложность. Чтобы воспроизвести реалистичный цвет десны, контролируйте Яркость, Опаковость и Уровень красного.

*Применение SS модификаторов (CZR) и модификаторов опаки (EX-3) могут помочь точнее подогнать цвет десны

IS Fluoro

Super Porcelain EX-3 Super Porcelain EX-3 PRESS CERAMIC PRESS CERAMIC PRESS

IS Fluoro - это прозрачный внутренний краситель, предназначенный для имитации флуоресценции натурального зуба. Он наносится не только на спеченные Дентин и Эмаль, но так же на поверхность циркониевого колпачка (для керамики **CZR**) и на поверхность опака (для керамики **EX-3**).

IS Fluoro можно смешивать с другими керамическими порошками, чтобы увеличить их флуоресценцию по Вашему усмотрению.

ПРИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ ОСВЕЩЕНИИ



Справа колпачок без нанесенной керамики
По-центру колпачек с нанесенным IS Fluoro
Слева натуральный моляр

ПРИ ОБЫЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ



*1 / 365nm

ЛИНЕЙКА ВНУТРЕННИХ КРАСИТЕЛЕЙ

White	Incisal Blue 1	Incisal Blue 2	Mamelon Orange 1	Mamelon Orange 2
Cervical 1	Cervical 2	Cervical 3	Earth Brown	Reddish Brown
Salmon Pink	Red	A+	B+	C+
D+	Bright	IS Fluoro	Gray	

SS Fluoro

CERAMIC PRESS

SS Fluoro - это базовый модификатор, предназначенный для повышения флуоресценции. Его можно не только смешивать с базовыми цветами, в качестве модификатора, но так же наносить на циркониевый колпачек

ЛИНЕЙКА БАЗОВЫХ МОДИФИКАТОРОВ

A+	B+	C+	D+	Cervical Orange
Incisal Blue1	Incisal Blue2	Gray	Salmon Pink	Earth Brown
Fluoro				

SYMBOLS USED IN A LABEL

MANUFACTURER	LOT	BATCH CODE	EU Authorized Representative Name: Kuraray Europe GmbH Address: Philipp-Reis-Str.4 65795 Hattersheim am Main, Germany	0120
USE BY	REF	CATALOGUE NUMBER		
CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	EC REP	AUTHORISED REPRESENTATIVE IN THE EUROPEAN COMMUNITY		