



Самосмешивающийся материал для временных коронок и мостов.

**Белый как снег,
прочный, как зубы медведя...**

coltène 
whaledent®

Удобство для пациента.

Cool Temp Natural не нагревается при полимеризации, что позволяет избежать травмирования пульпы и неприятных ощущений у пациента. Это позволяет добиться большего комфорта по сравнению с классической техникой производства временных коронок из акриловых пластмасс (пророшок+жидкость). НЕТ нагрева, НЕТ неприятного привкуса во рту. Использование Cool Temp позволяет сделать временные коронки в кабинете врача, непосредственно после препарирования.

Удобство для врача

Cool Temp Natural позволяет создать анатомически правильные и эстетически совершенные временные конструкции, не перепоручая это третьим лицам. В результате стоматолог **УВЕРЕН В КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ**. Работа с Cool Temp проста и удобна. Благодаря «упругой стадии» материал легко извлекается из слепка, после непродолжительного пребывания во рту. Ингибированный слой может быть легко удален, а готовая работа подрезана и отполирована.

Удобство системы AUTOMIX

Система AUTOMIX Cool Temp Natural позволяет точно смешивать различные материалы, например слепочную массу AFFINIS Coltene (1:1) и Cool Temp Natural 2:1 с помощью одного и того же диспенсора. Такая система экономит время, обеспечивает однородность материала и минимизирует потери, облегчает работу врача.



Работа шаг за шагом

Перед препарированием сделайте слепок.

Полезный совет

Если коронковая часть зуба сильно разрушена, то восстановите ее из любого композита, это упростит последующую работу

Внесите материал Cool Temp Natural в слепок и поместите его на препарированные зубы (35 сек.)

После 30-45 сек Cool Temp Natural может быть извлечен из полости рта. Благодаря эластичной консистенции он легко извлекается из слепка



Полезный совет

Для облегчения извлечения временной работы из слепка перед внесением Cool Temp Natural можно изолировать зубы Coltene Separator

После удаления слоя мономера с помощью спирта у Вас в руках аккуратная и полностью законченная работа

Полезный совет



Для удаления пор и дефектов, улучшения формы и эстетики воспользуйтесь Synergy Flow

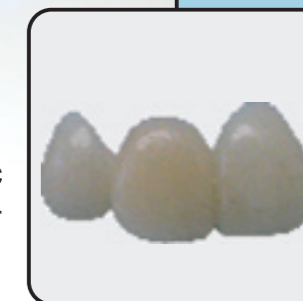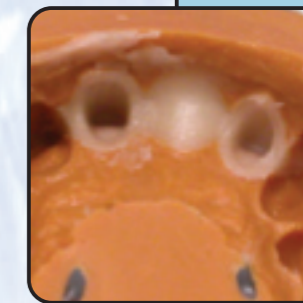

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ.

- ❄️ Легкость обработки и быстрота полировки
- ❄️ Высокая прочность
- ❄️ Естественная эстетика
- ❄️ Оптимальное «рабочее время» материала
- ❄️ Малое время в полости рта

Материалы для временных коронок и мостов

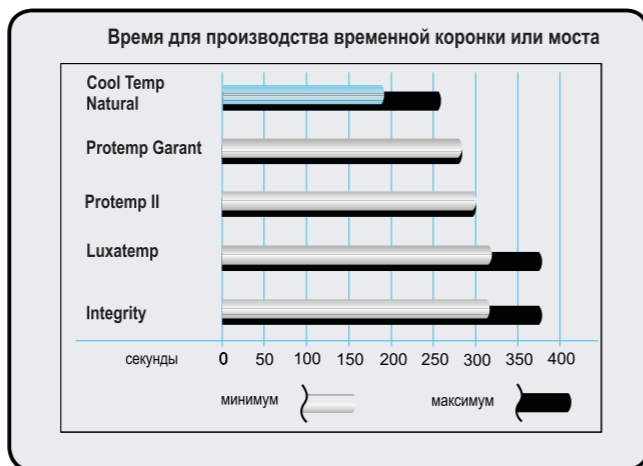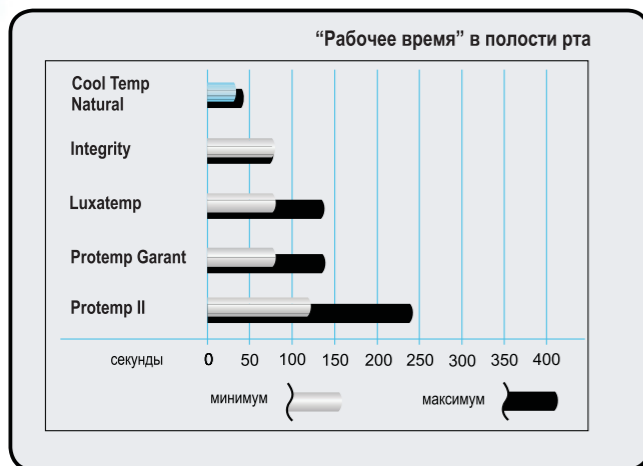

Сравнение с другими аналогичными материалами для производства временных коронок и мостов. Cool Temp Natural торговая марка Coltene/Whaledent, остальные товары не являются торговыми марками Coltene/Whaledent

Cool Temp®

N A T U R A L



5800 Cool Temp® Стартовый набор

Cool Temp® в картриджах,
цвет: A2, A3.5 2 × 85 гр.
Coltène® Насадки для смешивания
голубые/малые 20 шт.
SYNERGY® Flow A2/B2 1 × 2.3 гр.
SYNERGY® Flow A3.5/B3 1 × 2.3 гр.
Аппликационные иглы для Flow 4 шт.
Инструкция

5805 Cool Temp® Одиночная упаковка

Cool Temp® картридж
цвет: A 2 1 × 85 гр.
Coltène® Насадки для смешивания
голубые/малые 10 шт.
Инструкция

5810 Cool Temp® Одиночная упаковка

Cool Temp® картридж
цвет: A 3.5 1 × 85 гр.
Coltène® Насадки для смешивания
голубые/малые 10 шт.
Инструкция

5815 Cool Temp® Одиночная упаковка

Cool Temp® картридж
цвет: A 1 1 × 85 гр.
Coltène® Насадки для смешивания
голубые/малые 10 шт.
Инструкция

SYNERGY® Flow отдельные цвета

8450 A2/B2, 3 иглы 1 × 2.3 гр.
8451 A3.5/B3, 3 иглы 1 × 2.3 гр.
8469 Аппликационные иглы,
для SYNERGY® FLOW 20 шт.

6900 Coltène® Пистолет 50 / 75 ml

1 шт.


7774 Coltène® Насадки для смешивания голубые/малые

40 шт.

7235 Сепаратор (для интраорального использования)

5 шт.

Официальный дистрибьютор

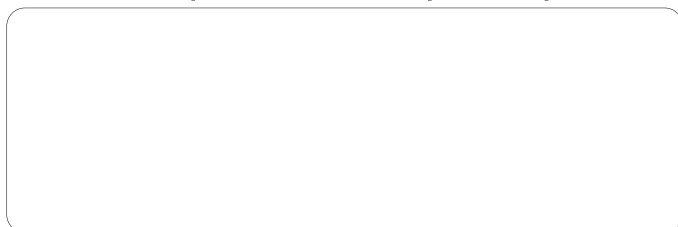

Coltène AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

coltène
whaledent®