



Робіть це правильно – Досконала Гігієна та Обслуговування.

Підготовка **хірургічних** прямих та кутових
наконечників та **хірургічних** мікромоторів фірми W&H



ВКАЗІВКИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ

Ці рекомендації щодо гігієни та обслуговування стосуються хірургічних прямих та кутових наконечників та мікромоторів фірми W&H

Обертаний інструмент, маркований даним символом, можна очищувати за допомогою термодезінфектора

Обертаний інструмент та стоматологічні мотори, марковані даним символом, адаптовані до стерилізації в автоклаві

Код - носій інформації. Маркування, що дає змогу ідентифікувати тип даного обладнання та його особливості, наприклад, щодо забезпечення певних гігієнічних процедур і обслуговування.

Загальні вимоги

> Будьте ласкаві, пам'ятайте, що обертальний інструмент має бути очищений та продезінфікований негайно після кожного пацієнта.

> Рекомендується використовувати рукавички, окуляри, захисну маску.

> Уважно ознайомтесь з інструкцією та рекомендаціями виробника.


> Використовуйте сертифіковані та перевірені дезінфіканти для обертального інструменту W&H та мікромоторів. Не використовуйте дезінфікантів, що містять хлориди.

> W&H рекомендує використовувати демінералізовану воду.

Прямі та кутові
наконечники

Хірургічні мотори

1 ПІДГОТОВКА / ПРЕ-ДЕЗІНФЕКЦІЯ 1

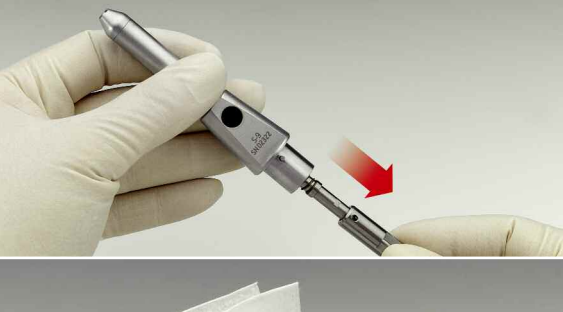

Видаліть обертальний інструмент (бор) із утримуючого механізму. Від'єднайте прямий / кутовий наконечник від мотору. Розберіть прямий / кутовий наконечник.

Від'єднайте хірургічний мотор із кабелем від блоку управління. Одніть захисний чохол на хірургічний мотор.

При наявності важких забруднень спершу протріть інструмент дезінфікуючою серветкою.

2 ОЧИЩЕННЯ / ОСУШЕННЯ 2



Ручне: очистити під проточною демінералізованою водою (<38°C). Після цього просушити серветкою і продути стисненим повітрям.

Ручне: очистити під проточною демінералізованою водою (<38°C). Після цього просушити серветкою і продути стисненим повітрям.

Машинне: Якщо Ви бачите даний символ, інструмент можна очищувати і дезінфікувати у термодезінфекторі

3 ДЕЗІНФЕКЦІЯ 3



Ручна: Дезінфекція здійснюється шляхом протирання інструменту дезінфікуючою серветкою чи контамінацією рідиною.

Ручна: Дезінфекція здійснюється шляхом протирання інструменту дезінфікуючою серветкою чи контамінацією рідиною.

Беріть до уваги рекомендації щодо використання дезінфікантів.

4 МОНТАЖ 4



При монтажі контролюйте серійні номери складових частин та елементів на відповідність.

У випадку стерилізації **із програмою сушки** - видаліть захисний чохол.

У випадку стерилізації **без сушки** - залишіть захисний чохол на мікромоторі.

5 ЗМАЩУВАННЯ 5



Ручне: Застосовуйте сервісне масло F1. Використовуйте відповідний перехідник та асорбуючу серветку.

Машинне: Для внутрішнього очищення та змащування використовуйте Assistina 301 plus.

Електромікромотори не обслуговуються.

6 СТЕРИЛІЗАЦІЯ / ЗБЕРІГАННЯ 6



Обертаний інструмент та мотори, що використовуються для інвазивного лікування, слід стерилізувати запакованим та зберігати у такому вигляді. Обертаний інструмент та мотори W&H стерилізують:

> шляхом вакуумно-парової стерилізації, автоклави Клас В

Відповідно до правил EN 13060 компанія W&H рекомендує використання автоклавів Класу В

Увага: Для збереження стерильності використовуйте стерильні пакети чи контейнери.

Додаткова інформація на сайті wh.com/hygiene